

1本お買い上げの皆様・・・

**無料サンプル1本プレゼント(先着30本限定)**

## お肌を守る「被膜剤」得々キャンペーン イーキンプロテクト バリアフィルム スプレー

ちゃんとスキンケアをしているはずなのに・・・  
お肌が赤い、ひりひりする むずがゆい...  
そうなる前に！！



プロテクトバリアフィルムが皮膚にシリコン系の膜を張り  
排泄物やテープの刺激からお肌を守ります。



使用者の声：  
肌への刺激がなく装具の  
密着が良くなった感じです。  
ミントの香りも素敵

1本お買い上げ  
2,484円(税込)

**無料サンプル  
1本進呈**

### 使用方法

1



保護する部位を清潔にし、  
完全に乾かします。

2



バリアフィルムスプレーを吹きかけるか、  
バリアフィルムワイブで該当部位を軽く  
拭き取ります。

3



数秒待って皮膚が乾いていることを  
確認してから粘着剤を貼り付けます。

注) 皮膚がかぶれている場合は、使用できません。医療機関への相談をお勧めします。

キャンペーン問い合わせ先  
(株)フィッティングO t u k a  
TEL 0 2 7 0 - 6 3 - 6 0 6 0

eakin® 

製品発売元：イーキンジャパン